



SPEEDSPLINT™

Multi-purpose Splint

Attelle tout-usage

Instructions for Use/Mode d'emploi

Assembly

Elbow & Ankle

1. Press and tear out
2. Fold upper end of splint to align side and back slots
3. Simultaneously Insert Both Through side and back slots
4. Insure both tabs lock securely when sides are released

Press and tear out Back slots, Side Slot

Foot plate

1. Do not tear out perforated areas
2. Fold as shown

Splint options

Upper Extremity

1. Elbow flexed to 90
2. Elbow extended
3. Wrist extended

Lower extremity

1. Ankle
2. Calf
3. Knee

Overlap splints

Made in Canada

Manufactured by MMSI

Canadian Re-order # 258-SS-M100

Fold printed side out

Trim and tape for children if necessary

X-Rays penetrate

Assemblage

Coude & cheville

1. Appuyer et détacher
2. Plier la partie supérieure de l'attelle afin d'aligner la fente latérale et la fente arrière
3. Insérer simultanément la fente latérale et la fente arrière
4. Assurez-vous que les deux languettes sont bien sécurisées lorsque les côtés sont libérés.

Appuyer et détacher Fentes arrière, Fente latérale

Zone du pied

1. Ne pas déchirer les zones perforées
2. Plier comme indiqué

Options d'attelles

Membre supérieur

1. Coude fléchie à 90
2. Prolongement du coude
3. Prolongement du poignet

Membre inférieur

1. Cheville
2. Mollet
3. Genou

Attelles superposés

Fait au Canada

Fabriqué par MMSI

Réapprovisionnement au Canada # : 258-SS-M100

Plier du côté de l'imprimé

Couper et enrrouler pour les enfants si nécessaire

Pénétration des rayons X



McArthur Medical Sales Inc.
1846 5th Concession West, Rockton, ON L0R 1X0
T+ 800.996.6674 / 519.622.4030
www.mcarthurmedical.com / mmsi@mcarthurmedical.com