



MediSox

Stocking size/ Grandeurs des chaussettes	Shoe size/Pointures	
	Women/Femme	Men/Homme
A	5 - 6	3 - 4
B	6 1/2 - 7 1/2	5 - 6
C	8 - 9	7 - 8
D	9 - 10 1/2	8 1/2 - 9 1/2
E		10 - 11
F		11 1/2 - 12 1/2

Colours • Couleurs



Black
Noir

White
Blanc

Navy
Marine

Sand
Sable

Grey
Gris



Lightweight
ribbed design.
Conception
côtelée et légère.

MediSox graduated
compression helps
improve circulation and
revitalize your legs.
Les chaussettes
MediSox à compression
graduée aident à améliorer
la circulation et à redonner
de la vitalité à
vos jambes.

Knit-in heel and toe.
Talon et pointe
en tricot.

• 60% Cotton
• 29% Polyamide
• 11% Lycra

• 60 % coton
• 29 % polyamide
• 11 % lycra

Stocking size/ Grandeurs des chaussettes	Shoe size/Pointures	
	Women/Femme	Men/Homme
A	5 - 6	3 - 4
B	6 1/2 - 7 1/2	5 - 6
C	8 - 9	7 - 8
D	9 - 10 1/2	8 1/2 - 9 1/2
E		10 - 11
F		11 1/2 - 12 1/2

Colours • Couleurs



Black
Noir

White
Blanc

Navy
Marine

Sand
Sable

Grey
Gris




1 Insert hand all the
way down heel.
Insérez votre main
jusqu'au talon.



2 Turn sock inside
out until heel is at
opening.
Tournez la chaussette
à l'envers jusqu'à ce
que le talon soit situé
dans l'ouverture de la
chaussette.



3 Stretch opening and
pull sock onto foot.
Étirez l'ouverture et
enflez la chaussette
sur votre pied.

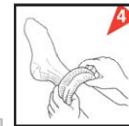

4 Pull sock up leg
while turning right
side out. Make sure
sock lays flat with
no folds.
Montez la chaussette
sur votre jambe en la
déroulant du côté ap-
proprié. Assurez-vous
que la chaussette est
lisse et sans aucun pli.

Machine washable and tumble dry on
delicate cycle. Do not use chlorine bleach.
Laver à la machine et sécher par culbutage
à cycle délicat. Ne pas utiliser d'agent chloré
de blanchiment.



P.O. Box 7
Rockton, Ontario L0R 1X0
www.mcarthurmedical.com



McArthur Medical Sales Inc.

1846 5th Concession West, Rockton, ON L0R 1X0

T+ 800.996.6674 519.622.4030

F+ 519.622.1142

mmsi@mcarthurmedical.com www.mcarthurmedical.com

MADE IN SWEDEN • FABRIQUÉ EN SUÈDE